

# Mepiform®

## Selvheftende myk silikonbandasje for arrbehandling

- Ekstra fiksering ikke nødvendig
- Former seg etter kroppen
- Kan brukes under daglige aktiviteter



### Film/nonwoven bakside

- Pustende
- Vanntett

### Safetac® lag (myk silikon)

- Atraumatisk mot huden ved fjerning

## Slik fungerer Mepiform

Silikon har empirisk vist seg å ha en positiv virkning på hypertrofiske arr og keloider<sup>1</sup>. Det kan ta fra tre måneder opp til ett år eller mer for å oppnå ønsket virkning på gamle arr, avhengig av arrvevets tilstand. Mepiform bør brukes 24 timer i døgnet. Mepiform bør fjernes en gang daglig, for eksempel i forbindelse med dusjing eller bading, for å inspisere og rengjøre huden under. Mepiform kan også brukes for å forebygge hypertrofiske arr og


keloider. I den forbindelse bør Mepiform brukes fra to til seks måneder avhengig av arret.

## Bruksområder


Mepiform egner seg til bruk på:

- Gamle- og nye hypertrofiske arr og keloider
- Lukkede sår for å forebygge hypertrofiske arr og keloider


## Hvordan bruke Mepiform

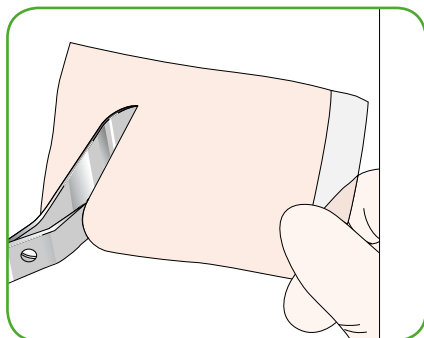

Fjern releasefilmen. Hvis nødvendig, klipp til riktig fasong.

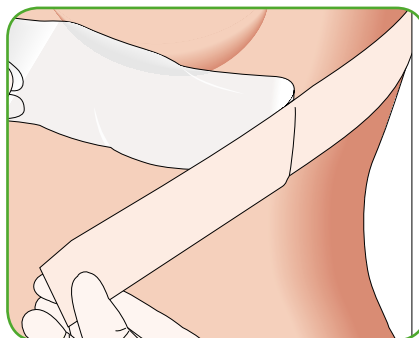

Appliser Mepiform på arret.

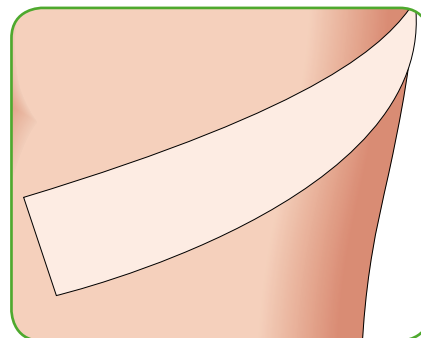

Reappliser etter daglig rengjøring av arret.

## Fordeler med Mepiform

- Ekstra fiksering ikke nødvendig
- Mepiform er tynn, fleksibel og diskret
- Kan brukes under daglige aktiviteter
- Kan reappliseres
- Mepiform kan ligge på i mange dager

## NB!

Skulle det oppstå maserasjon eller kløe, bør huden hvile til symptomene har forsvunnet. Fortsett deretter behandlingen, og øk gradvis behandlingstiden per dag. Mepiform har en ultrafiolett beskyttelsesfaktor lik 7,7.

## Hva er Safetac teknologi?

Safetac er en patentert teknologi for skånsom men sikker fiksering med myk silikon. Safetac minimerer skade og smerte på såret og omkringliggende hud ved bandasjeskift.

### Referanser:

Dahlström KK. A New Silicon Rubber Dressing used as a Temporary Dressing before Delayed Split Skin Grafting. Scand J Plast Reconstr Hand Surg. 1995;29:325-327  
Platt A J, et al. A Comparative Study of Silicone Net Dressing and Paraffin Gauze Dressing in skin-Grafted sites. Burns 1996;22:7:543-545.  
Dykes P, et al. Effect of Adhesive Dressings on the Stratum Corneum of Normal Skin Journal of Wound Care, 2001;10:2:7-10.



### Sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
293100	4 × 30	5	25
293200	5 × 7,5	5	30
293400	10 × 18	5	25

Mepiform er pakket i sterile enhetspakninger

Mölnlycke Health Care  
Postboks 6229, Etterstad  
0603 Oslo  
Telefon: 22 70 63 70  
www.molnlycke.com

The symbol and the word mark are both registered trademarks or trademark pendings of Mölnlycke Health Care.

