


Bruk bandasjen din riktig

Pasientinformasjon

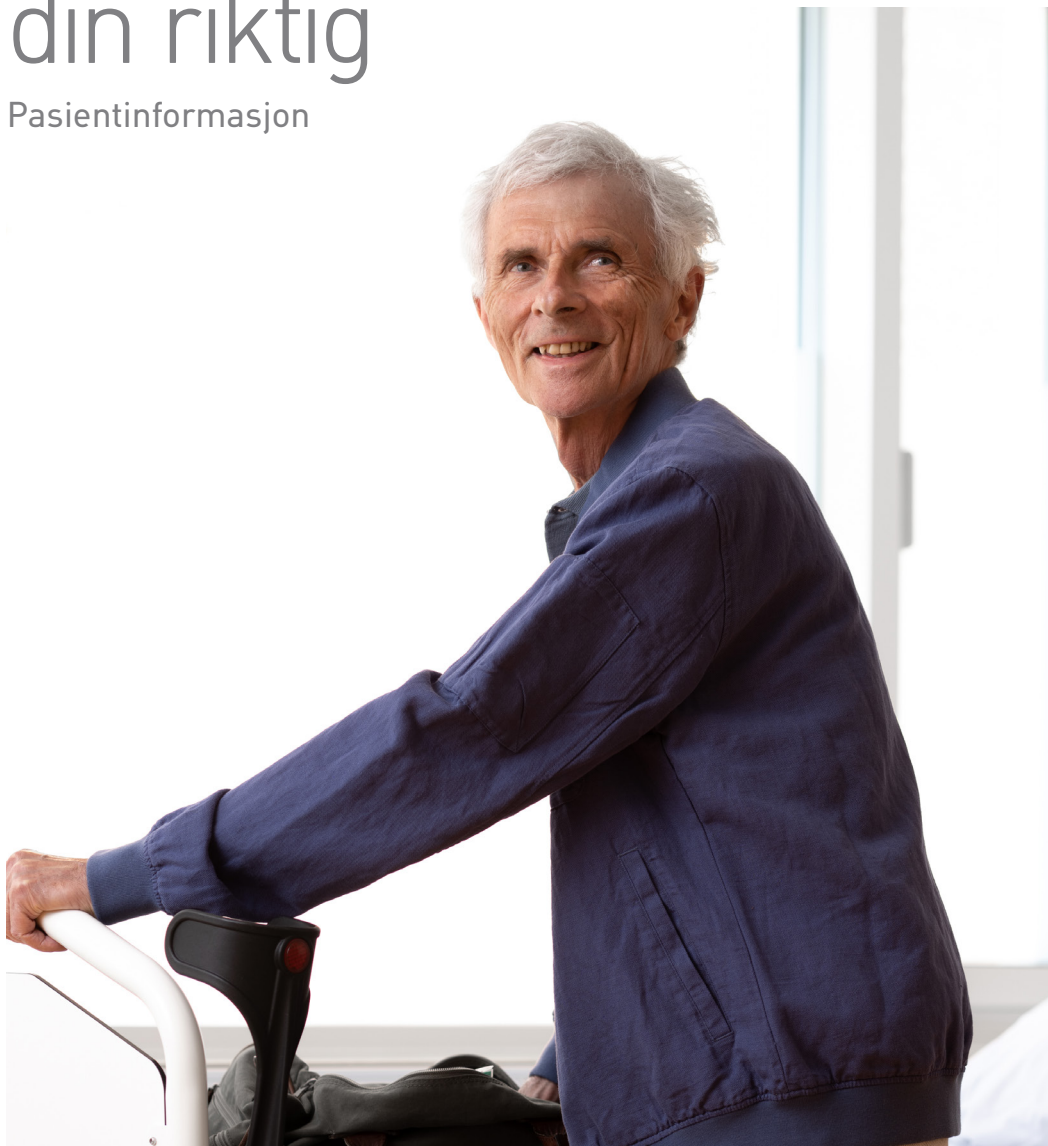

Mepilex® Border Post-Op


Mölnlycke®




Mepilex® Border Post-Op er valgt for å behandle operasjonssåret ditt

Her får du litt informasjon og tips om bandasjen

La bandasjen sitte på

Bandasjen er utviklet for å sitte på så lenge som mulig. Husk at den første bandasjen ble lagt på i renest mulig omgivelser på operasjonsstua. Hver gang du skifter eller løfter den for å ta en kikk, risikerer du å eksponere operasjonssåret for forurensning og økt risiko for infeksjon. Så la den være på plass, ikke skift den eller løft på den, med mindre du får beskjed om det av en helsearbeider.

Hvis helsearbeideren ber deg om å skifte bandasjen, kan du skanne denne QR-koden eller gå til www.molnlycke.no for veiledning om skifte/påføring.

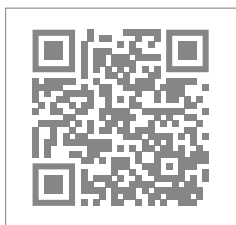

molnlycke.no/produkter-losninger/mepilex-border-post-op/




Skiftes bare når det er nødvendig

Ikke bli redd hvis du ser blod i bandasjen! Mepilex® Border Post-Op er utviklet for å effektivt absorbere store mengder blod og fjerne det fra operasjonssåret, ved å låse det inne i puten i midten av bandasjen.

Skifte ikke nødvendig!

Skifte nødvendig!

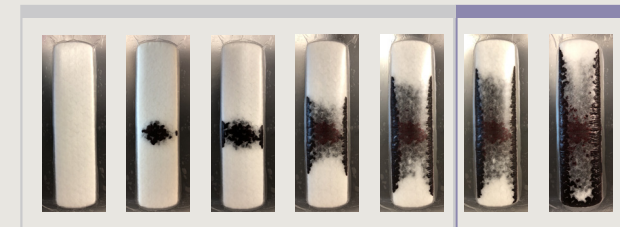

- **I sjeldne tilfeller**, blør operasjonssåret så mye at bandasjen blir gjennomtrukket. Hvis dette skjer, tar du kontakt med helsearbeideren for råd.

- **Når du kler på deg** skal du være forsiktig så ikke bandasjen dras av.

- **Du kan trygt** ta en dusj med bandasjen på, men unngå å sprute vann direkte på bandasjen. Ikke ta et bad eller en svømmetur.

- **Du trenger ikke bekymre deg** over smerter ved fjerning av bandasjen. Bandasjen er utviklet for å minimere smerte ved fjerning. Det er ikke behov for noen spesiell teknikk, bare dra fra et hjørne av bandasjen og fjern den.

Ytteligere informasjon om din Mepilex® Border Post-Op:

- 6 × 8 cm
- 9 × 10 cm
- 10 × 15 cm
- 10 × 20 cm
- 10 × 25 cm
- 10 × 30 cm
- 10 × 35 cm



Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke og Mepilex er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care.
©2024 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC5072405

