

Mepilex[®] Border

Absorberende alt-i-ett skumbandasje

Absorberende skumpute med flere lag

- Hydrofilt polyuretanskum for rask absorpsjon av sårsekret
- Nonwoven spredningslag for optimal utnyttelse av bandasjens væskehåndteringskapasitet
- Superabsorberende lag for maksimal oppsamling av væske hindrer lekkasje og maserasjon

Baksidefilm med bakterie- og virusbarriere*

- Dusjtett
- Pustende

* mikrober større enn 25 nm



Safetac[®] teknologi

Safetac er en hefteteknologi som minimerer skade på såret og smerte for pasienten. Safetac teknologi finnes kun i bandasjer fra Mölnlycke Health Care, inkludert Mepilex[®] - familien, Mepitel[®], Mepiform[®] og Mepitac[®].

Safetac
TECHNOLOGY

- Atraumatisk mot såret og omkringliggende hud ved fjerning¹
- Hefter skånsomt til tørre overflater som hud, men ikke til fuktige sårflater²
- Minimerer risikoen for maserasjon ved å danne en barriere rundt sårkantene³
- Føyer seg etter hudens konturer




- Effektiv væskehåndtering
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift¹
- Sikker fiksering, men likevel atraumatisk ved fjerning
- Dusjtett


Mepilex[®] Border


Mölnlycke[®]

Hvordan bruke Mepilex® Border

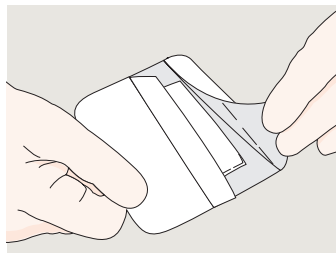

Rens sårområdet.
Fjern releasepapiret.

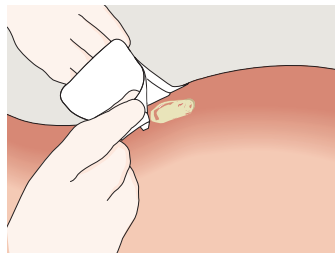

Appliser den heftende siden mot såret.
Ikke strekk.



Mepilex Border Sacrum



Mepilex Border Heel

Fordeler med Mepilex Border

- Selvhæftende
- Ikke behov for fiksering
- Minimerer skade og smerte ved bandasjeskift
- Kan ligge på såret i opptil syv dager, avhengig av sårets tilstand
- Dusjtett
- Kan løftes og justeres uten å miste den heftende egenskapen
- Komfortabel i bruk
- Kan brukes under kompresjon
- Liten risiko for hudirritasjon og allergi

Slik fungerer Mepilex Border

Mepilex Border er en alt-i-ett skumbandasje som absorberer og holder på sårvesken og opprettholder et fuktig sårmiljø. Safetac forseglar sårkantene og hindrer at sårveske lekker ut på omkringliggende hud. Dermed forhindres maserasjon. Safetac sikrer at bandasjen kan skiftes uten å skade huden og uten å utsette pasienten for ytterligere smerte.

Mepilex® Border sortiment (sterile enhetspakninger)

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
Mepilex Border			
295200	7,5 x 7,5	5	70
295300	10 x 10	5	50
295400	15 x 15	5	50
295600	15 x 20	5	45
295800	10 x 20	5	35
295850	10 x 25	5	35
295900	10 x 30	5	25

Bruksområder

Mepilex Border egner seg til en rekke væskende sår som for eksempel:

- Trykksår
- Legg- og fotsår
- Traumatiske sår, blant annet hudflenger og kirurgiske sår

NB!

Dersom det er kliniske tegn til infeksjon, kan bruken fortsette dersom man setter i verk infeksjonsbehandling.

Mepilex® Border Sacrum sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
282050	16 x 20	5	40
282450	22 x 25	5	30

Sterile enhetspakninger

Mepilex® Border Heel sortiment

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
282750	22 x 23	6	30

Sterile enhetspakninger

Referanser: 1. White R. A. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. Principles of best practice: Minimising pain at wound dressing-related procedures. A consensus document. London: MEP Ltd, 2004. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritation and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

For mer informasjon, se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70
The Mölnlycke, Mepilex and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. (copyright tecken) 2017 Mölnlycke Health Care. All rights reserved.