

# Lyofoam® MaxT

En svært absorberende polyuretan skumbandasje for bruk rundt trakeostomi

## Polyuretan baksiddefilm


- Semipermiabel
- Vanntett

## Åpning

- En tredjedel fra kanten av bandasjen
- Optimal håndtering rundt trakeostomien


## Hydrofilt polyuretanskum

- Høy absorpsjon og væskehåndteringskapasitet
- Ikke-klebende
- Myk, føyelig og enkel å applisere og fjerne

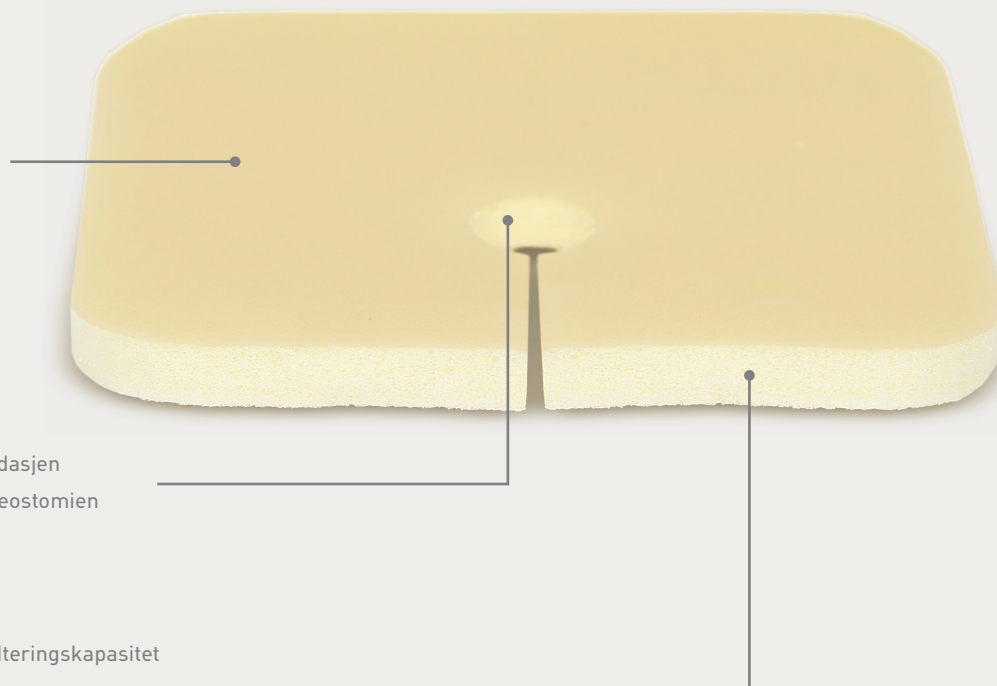


Lyof foam® Max T er en myk trakeostomi-bandasje som absorberer eksudat/sekresjon og gir beskyttelse for huden rundt trakeostomien.


## Hvordan bruke Lyofoam® Max T

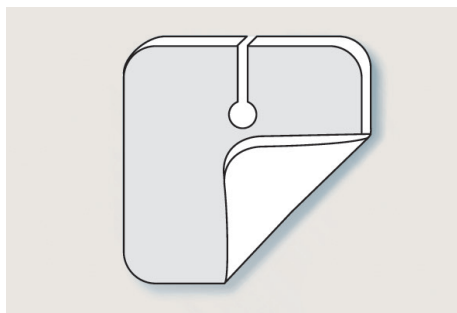

1. Rengjør den omkringliggende huden. Tørk huden før applisering av Lyofoam® Max T.

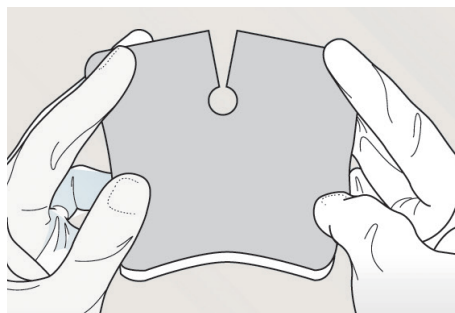

2. Plassér Lyofoam Max T med hullet rundt stomien, med det hvite skummet mot pasientens hals.

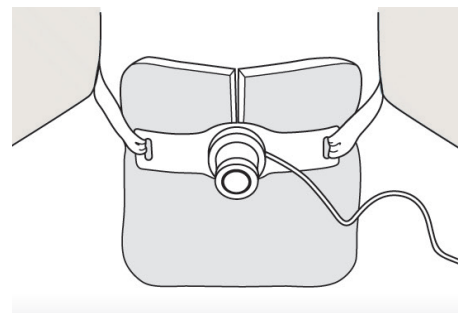

3. Hvis det trengs fiksering kan tape benyttes. Tapen skal kun festes til kanten av Lyofoam Max T.

## Bruksområder

Lyofoam Max T er utviklet for bruk rundt trakeostomi for å gi absorpsjon og beskyttelse.

## Skiftefrekvens

Lyofoam Max T skal byttes i henhold til lokale retningslinjer eller når den er mettet.

## Fordeler med Lyofoam Max T

- Høy absorpsjon og væskehåndteringskapasitet
- Reduserer risiko for maserasjon
- Beskytter huden rundt trakeostomien
- Enkel å applisere og fjerne
- Myk og komfortabel
- Behagelig for brukeren
- Ikke-klebende



## Lyofoam Max T sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
603207	9 x 9	10	60

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. The Mölnlycke and Lyofoam trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0971905

  
**Mölnlycke®**