



Lyofoam[®] Max

En svært absorberende polyuretan skumbandasje

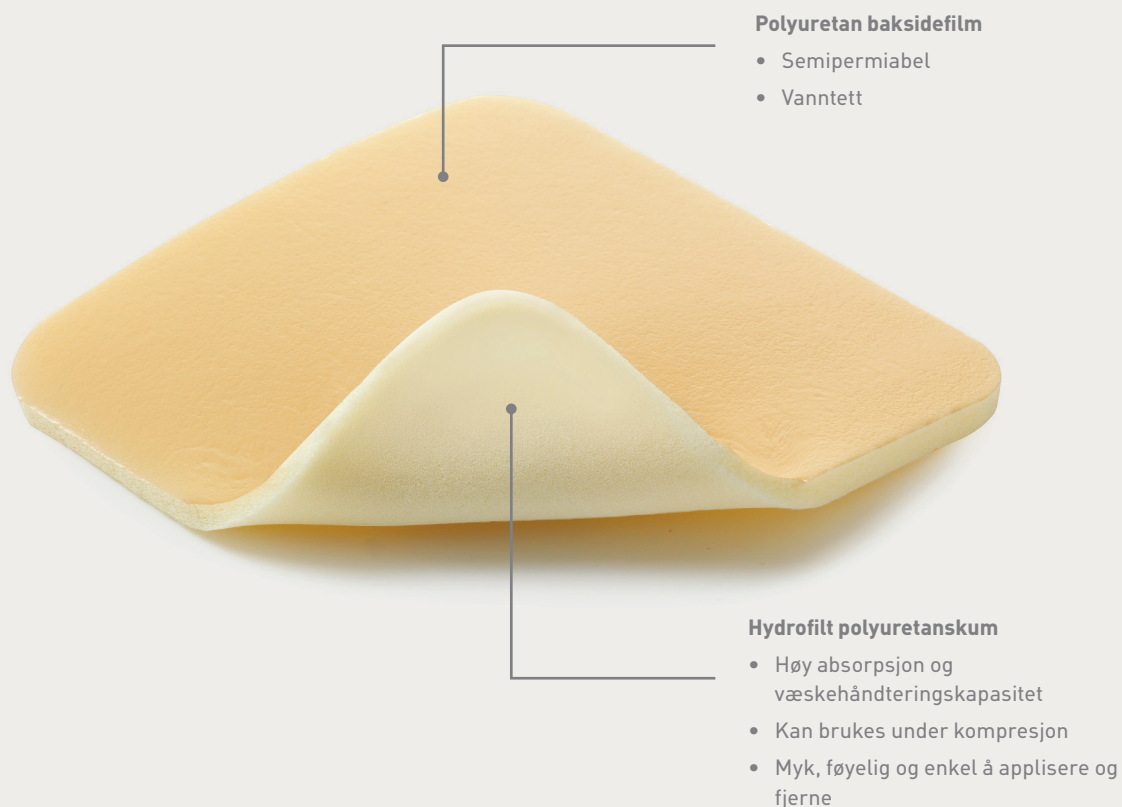


Lyofom[®] Max er en svært absorberende bandasje som består av polyuretanskum og en vanntett baksidfilm. Den har høy fordampningsevne som gir effektiv væskehåndtering for moderat til svært væskende sår.


Hvordan bruke Lyofoam® Max

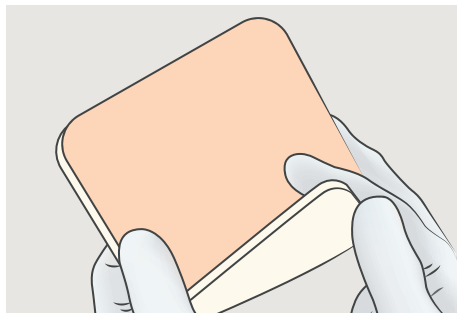

1. Rens sårområdet og velg en passende Lyofoam® Max.

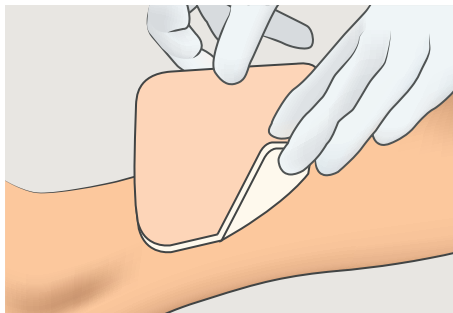

2. Plassér skumsiden direkte på såret, med 2 cm overlapping til omkringliggende hud.

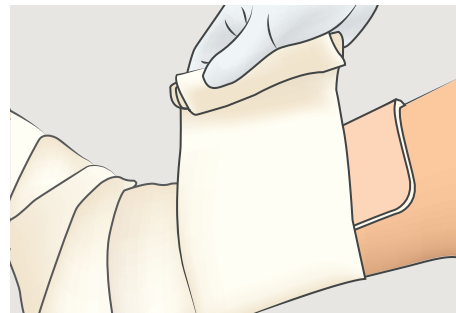

3. Fest Lyofoam Max med en passende fiksering som for eksempel Tubifast®, Tubigrip® eller Mefix®.

Bruksområder

Lyofoam Max er designet for håndtering av moderat til svært væskende sår, som leggsår og trykksår.

Gjennom effektiv væskehåndtering skaper Lyofoam Max et fuktig miljø for optimal sårheling.

Fordeler med Lyofoam Max

- Høy absorpsjon og væskehåndteringskapasitet¹
- Reduserer risiko for maserasjon¹
- Kan brukes under kompresjon
- Enkel å applisere og fjerne
- Myk og føyelig, og er behagelig for pasienten
- Hudvennlig
- Flere størrelser tilgjengelig for forskjellige sårtyper

Skiftfrekvens

Lyofoam Max kan ligge på såret i flere dager, avhengig av sårets og den omkringliggende hudens tilstand og mengde sårveske.

Referanse:

1. Mölnlycke Health Care. Data on file.



Lyofoam Max sortiment (sterile enhetspakinger)

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
603200	7,5 x 8,5	10	120
603201	10 x 10	10	60
603203	10 x 20	10	60
603204	15 x 15	10	70
603205	15 x 20	10	60
603206	20 x 20	10	80

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Lyofoam Max, Mefix, Tubigrip and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0981905


Mölnlycke®