


Mepilex® Transfer Ag

Antimikrobiell væsketransporterende bandasje med myk silikon

Fleksibelt skum som transporterer væske^{1,2,3}

- Absorberer væske og transporterer det til en sekundærbandasje
- Minimerer risikoen for maserasjon

Føyer seg etter kroppen på steder som er vanskelige å bandasjere³

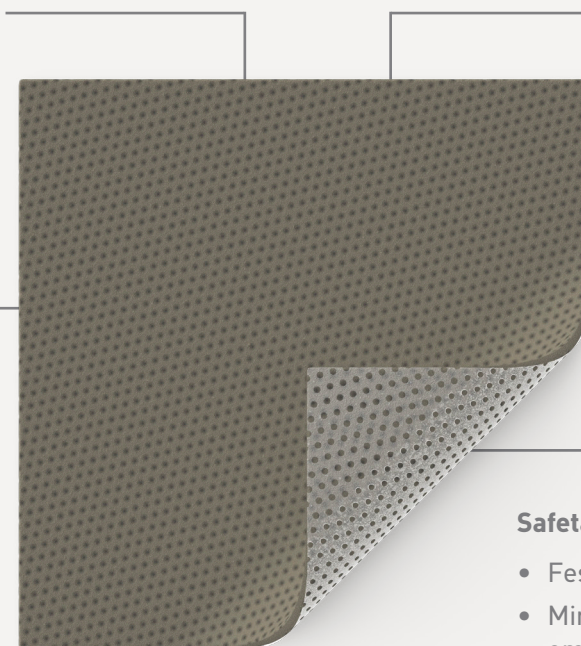

Antimikrobiell effekt³

- Inaktiverer et bredt spekter av sårrelaterte patogener (*in vitro*)
- Innen 30 minutter (*in vitro*)
- Opptil 14 dager (*in vitro*)

Safetac-lag^{1,2,3}

Safetac
TECHNOLOGY

- Fester ikke i fuktig sårseng
- Minimerer skade på såret og omkringliggende hud
- Minimerer smerte for pasienten ved fjerning av bandasjen


Safetac®-teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

Bandasjer med Safetac® er klinisk bevist å minimere skade på såret og huden ved fjerning. Ved å forsegle sårkantene, forhindres maserasjon. Med mindre skade på såret og huden, minimeres smerten ved bandasjeskift. Derfor har flere randomiserte studier vist at bandasjer med Safetac gir raskere sårheling og lavere totale behandlingskostnader.

Les mer på www.molnlycke.no/produktstotte/safetac-referanser/




Uten Safetac

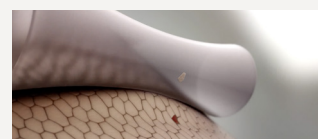

Med Safetac

- Minimerer smerte og skade ved bandasjeskift^{1,2,3}
- Gir uforstyrret sårheling og færre primærbandasjeskift da væsken transporteres vertikalt opp i en sekundær absorberende bandasje^{1,2,3}
- Allsidig bruk på sår på ulike områder på kroppen med ulikt væskenivå^{1,2,3}


Hvordan bruke Mepilex® Transfer Ag

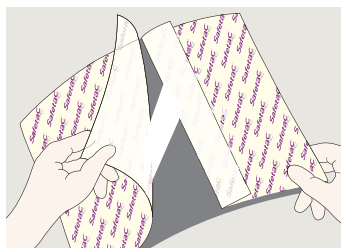


1. Rens såret med saltvannsløsning eller vann i henhold til standard praksis. Tørk omkringliggende hud grundig.



2. Velg passende bandasjestørrelse. For best resultat, sørg for at bandasjen dekker sårsengen og overlapper sårkantene. Klipp til ønsket størrelse (om nødvendig). Fjern releasepapiret og legg den heftende siden ned mot såret. Strekk ikke bandasjen.

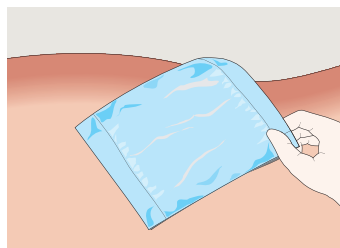

3. Appliser en sekundærbandasje tilpasset væsknivå. Sekundærbandasjen bør dekke kantene av Mepilex Transfer Ag.

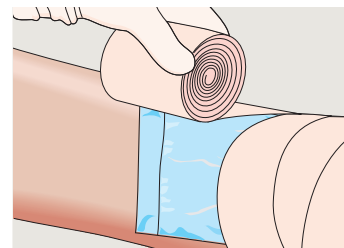

4. Om nødvendig, fikser Mepilex Transfer Ag med en tubulær bandasje eller annen fiksering.

Slik fungerer Mepilex Transfer Ag

Mepilex Transfer Ag er et mykt sårkontaktlag med silikon som absorberer og transporterer sårveske^{1,2,3}.

Mepilex Transfer Ag inneholder sølvsulfater som effektivt skaper en barriere mot bakterier og inaktiverer et bredt spekter av sårrelaterte patogener (bakterier og sopp) (*in vitro*³).

Mepilex Transfer Ag kan ligge på såret i opptil 14 dager*.

Bruksområder

Mepilex Transfer Ag er ment til bruk på en rekke lite til svært væskende fot- og leggsår, trykksår, cancersår, delhudsbrannskader og donorsteder, hvor det er en risiko for infeksjon.

Mepilex Transfer Ag kan brukes på infiserte sår som del av et behandlingsregime overvåket av kvalifisert helsepersonell.

Mepilex Transfer Ag kan brukes under kompresjonsbandasjer.

Fordeler med Mepilex Transfer Ag

- Minimerer smerte og skade ved bandasjeskift^{1,2,3}
- Enkel å bruke og føyer seg godt på områder som bryst, hode, ansikt og fingre^{1,2,3}
- I kombinasjon med egnet sekundærbandasje, opprettholdes et fuktig sårmiljø^{1,2,3}
- Ved å redusere antall mikroorganismer, kan Mepilex Transfer Ag også redusere odør³

Mepilex Transfer Ag sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
394000	7,5 x 8,5	10	70
394100	10 x 12,5	5	50
394800	15 x 20	10	50
394500	20 x 50	2	12

*avhengig av pasient, sårets og omkringliggende huds tilstand eller ihht. gjeldende praksis.

Referanser: 1. Schweiger H, Smith D, Cruse CW et al. An open, non-controlled, single-centre, clinical investigation to evaluate efficacy when using a soft silicone wound contact layer containing silver. Poster presentation at the 15th European Burns Association Congress, Vienna, Austria, 2013 2. Dhataria, K., Gooday, C., Franke, B., Pilling, T., Flanagan, A., Zeidan, L. (2016): An open, non-comparative, multicentre evaluation of performance and safety using an antimicrobial exudate transfer dressing on diabetic foot ulcers: a case series. In Journal of wound care 25(5), pp. 256–265. 3. Mölnlycke Health Care, Data on file.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mepilex og Safetac er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2023 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC4122308


Mölnlycke®