


Mepitac®

For fiksering av medisinsk utstyr


Safetac®-lag

- Minimerer smerte for pasienten ved fjerning¹

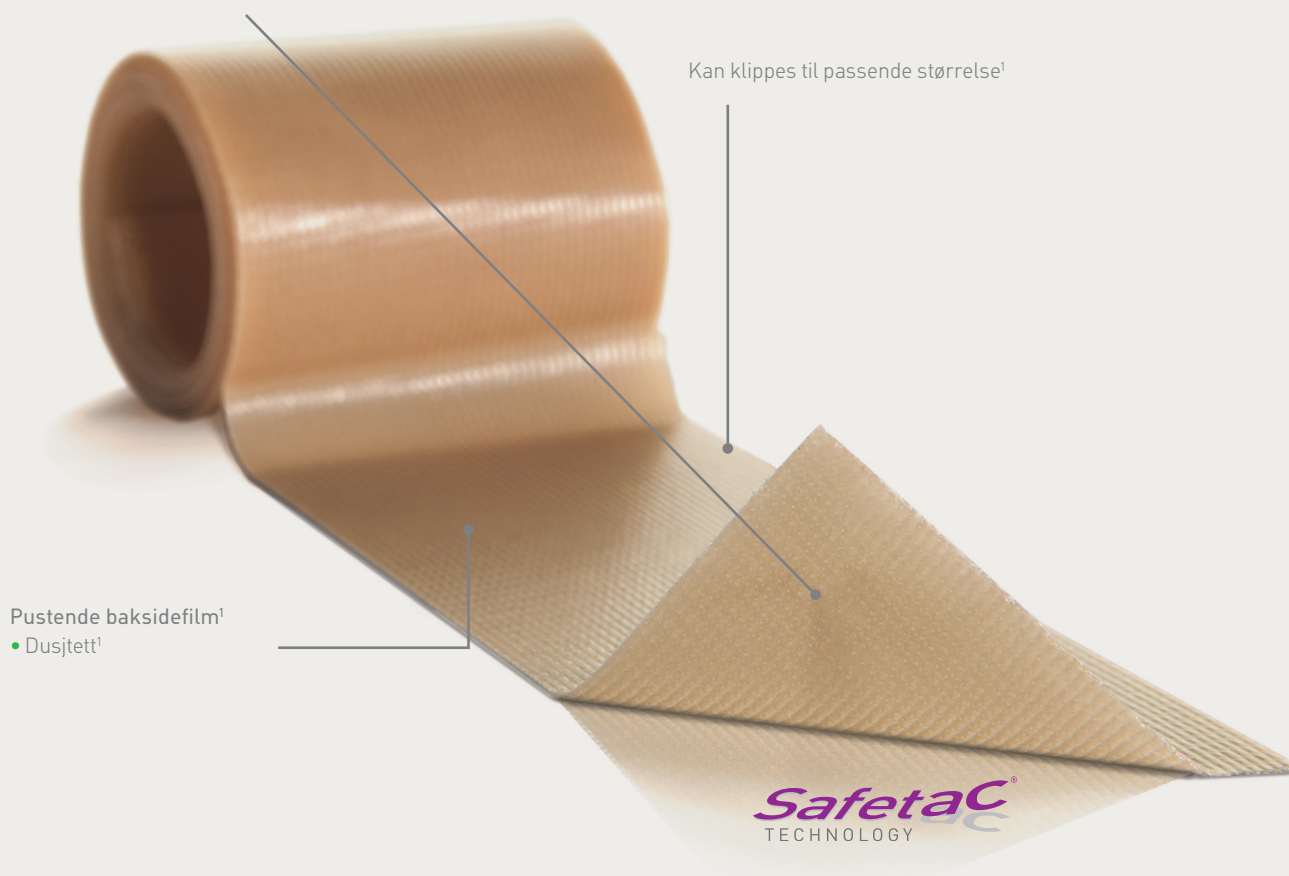

Safetac®-teknologi. Mindre skade. Mindre smerte.

Bandasjer med Safetac® er klinisk bevist å minimere skade på såret og huden ved fjerning. Ved å forsegle sårkantene, forhindres maserasjon. Med mindre skade på såret og huden minimeres smerten ved bandasjeskift. Derfor har flere randomiserte studier vist at bandasjer med Safetac gir raskere sårheling og lavere totale behandlingskostnader.

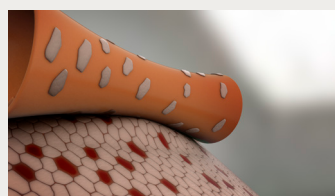

Tradisjonelle heftemidler medfører stripping av hud




Safetac® minimerer stripping av hud


- Minimerer smerte ved bandasjeskift¹
- Beskytter huden ved bruk under utstyr som f.eks. slanger¹

- Former seg etter kroppens konturer¹


Hvordan bruke Mepitac®

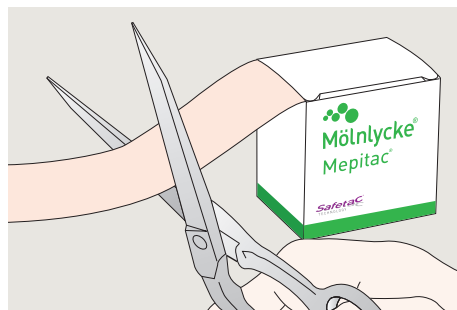

1. Sørg for at huden er ren og tørr og uten salverester o.l. Klipp til ønsket størrelse.

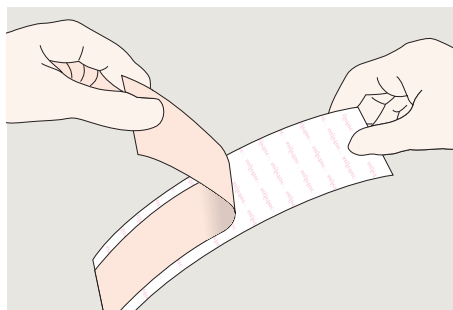

2. Fjern den beskyttende releasefilmen.

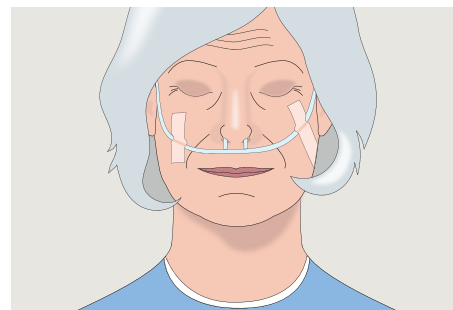

3. Appliser Mepitac uten å strekke den. Mepitac kan justeres og reappliseres hvis det er nødvendig å inspisere området.

Slik fungerer Mepitac

Mepitac er enkel å bruke og gir sikker fiksering av medisinsk utstyr. Kan også brukes som beskyttelse av huden ved bruk under medisinsk utstyr¹.

Mepitac kan justeres og reappliseres uten å miste hefteegenskapene¹ og etterlater minimalt med produktrester ved fjerning¹.

Fordeler med Mepitac

- Minimerer smerte ved bandasjeskift¹
- Former seg enkelt etter kroppens konturer¹
- Dusjtett¹
- Pustende¹



Bruksområder

Mepitac er utviklet for å feste medisinsk utstyr som dren, slanger, sonder, elektroder, IV-kanyler og bandasjer, skånsomt til huden. Mepitac beskytter huden ved bruk under utstyr som f.eks. slanger.



Mepitac sortiment

Art.nr.	Størrelse	Antall i eske	Antall i kartong
298300	2 cm x 3 m	1	12
298400	4 cm x 1,5 m	1	12
Apotekspakning med oppheng			
298370	2 cm x 3 m	1	12

Referanse: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mepitac and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. ©2023 Mölnlycke Health Care. All rights reserved. N0WC2292303


Mölnlycke®