


Mepore® Film

Pustende, transparent
selvheftende filmbandasje

Enkel å
applisere, også
ved bruk av
hansker¹

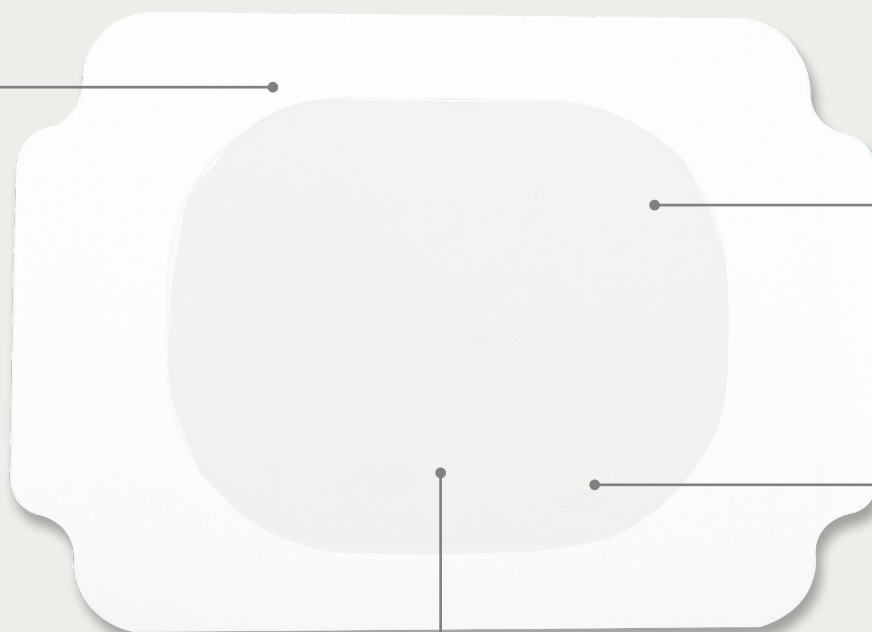

Hudvennlig¹

Fungerer som barriere
mot viral og bakteriell
kontaminering*¹

Former seg etter ujevnheter
og kroppens konturer¹

* mikrober større enn 25 nm

Mepore® Film er en transparent, selvheftende filmbandasje, ideell som sekundær fikseringsbandasje.


Mepore Film egner seg til beskyttelse av intakt hud og overfladiske sår. Den kan også brukes til fiksering av medisinsk utstyr som sårbandasjer, slanger og kanyler.

Filmens pusteevne minimerer risikoen for maserasjon. Hudvennlig heftemiddel sørger for skånsom og sikker fiksering.

Hvordan bruke Mepore® Film



1. Fjern beskyttelsespapiret (med Mepore-logo) slik at hefteflaten kommer til syne.

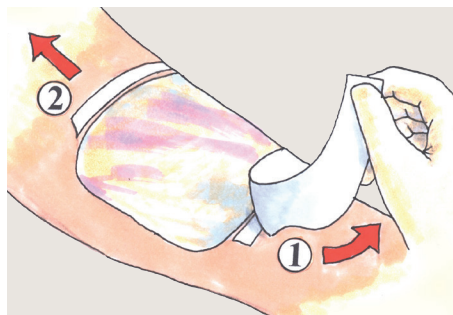

2. Legg på bandasjen og stryk den forsiktig mot huden. Fjern papirrammen og de to hvite sidestriplene. Ikke strekk bandasjen ved applisering!

Slik fungerer Mepore Film

Mepore Film sørger for skånsom og sikker fiksering. Gjennomsiktigheten gjør det enkelt å inspisere huden jevnlig.

Filmens bakterie- og virusbarriere* sørger for at fuktighet og svette fordamper. Mepore Film er elastisk og former seg etter ujevnheter og kroppens konturer.

Bruksområder


Mepore Film er en transparent, selvheftende filmbandasje, ideell som sekundær fikseringsbandasje.

Den egner seg til beskyttelse av intakt hud og overfladiske sår. Mepore Film kan også brukes til fiksering av medisinsk utstyr som sårbandasjer, slanger og kanyler.

Fordeler med Mepore Film

- Sikker fiksering
- Hudvennlig
- Transparent
- Tynn og fleksibel
- Former seg etter kroppens konturer
- Høy pusteevne
- Enkel å påføre
- Aseptisk påføring mulig

* mikrober større enn 25 nm

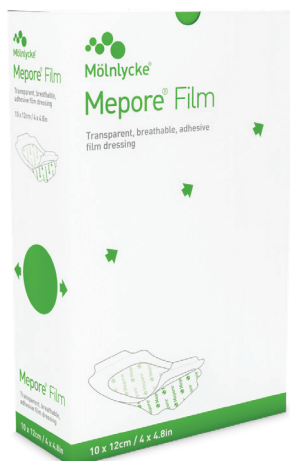

Referanse: 1. Mölnlycke Health Care. Data on file. 2021.

For mer informasjon, se www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70. The Mölnlycke and Mepore trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2021 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2762201

Mepore Film sortiment (sterile enhetspakninger)

Art.nr.	Str. i cm	Antall i eske	Antall i kartong
270600	6 x 7	100	600
271500	10 x 12	70	210
272500	10 x 25	20	100
273000	15 x 20	10	50
273500	20 x 30	5	30

