

# Mepore® Pro

Dusjtett selvheftende, absorberende bandasje



\* mikrober større enn 25 nm

Mepore® Pro er en selvheftende, absorberende og pustende bandasje som beskytter såret mot vann og kontaminering. Det hudvennlige, dusjtette festemiddelet gir en skånsom og sikker fiksering.

## Hvordan bruke Mepore® Pro



1. Ta tak i beskyttelsespapiret ved overlappingen og dra det litt ifra hverandre slik at den heftende overflaten kan festes til såret.



2. Appliser bandasjen på huden uten å strekke den, og fjern forsiktig resten av beskyttelsespapiret.



3. Stryk over bandasjens kant for å sikre god heft. Ikke strekk bandasjen ved applisering.

## Slik fungerer Mepore Pro

Mepore® Pro er en pustende, selvheftende bandasje som absorberer blod og sårveske. Baksidefilmen tillater dusjing og beskytter såret mot vann og kontaminering. Hudvennlig heftemiddel gir skånsom og sikker fiksering. Den myke og elastiske baksidefilmen er utviklet for pasientkomfort og føyer seg lett etter kroppens konturer.

## Fordeler med Mepore Pro

- Dusjtett
- Lavheftende sårkontaktlag minimerer risikoen for at bandasjen sitter fast i såret
- Beskytter såret mot vann og ytre kontaminering
- Baksidefilm med bakterie- og virusbarriere\*
- Absorberer blod og sårveske
- Komfortabel
- Pustende film
- Lav friksjon mot klær og sengetøy
- Hudvennlig heftemiddel

\* mikrober større enn 25 nm


## Bruksområder

Mepore Pro kan brukes på lite til moderat væskende sår, som for eksempel kirurgiske sår, kutt og skrubbsår.

## Mepore Pro sortiment (sterile enhetspakninger)

Art.nr.	Størrelse i cm	Sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
680860*	6 x 7	3 x 4	5	70
670820	6 x 7	3 x 4	60	480
680960*	9 x 10	4,5 x 6	5	100
670920	9 x 10	4,5 x 6	40	320
681060*	9 x 15	4,5 x 10	5	70
671020	9 x 15	4,5 x 10	40	320
671140	9 x 20	4,5 x 15	10	140
671120	9 x 20	4,5 x 15	30	180
671220	9 x 25	4,5 x 20	30	180
671320	9 x 30	4,5 x 25	30	270

\* Kan henges på pigg

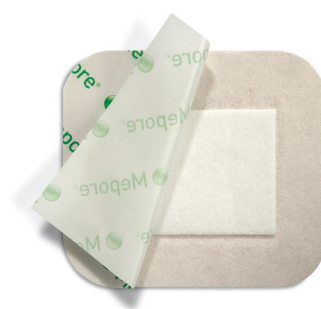

Les mer på [www.molnlycke.no](http://www.molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
The Mölnlycke and Mepore, trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. ©2018 Mölnlycke Health Care. All rights reserved. NOWC0832111

  
**Mölnlycke®**