

Mesalt®

Rensende bandasje med natriumklorid


**Absorberende
nonwoven-materiale**

- Impregnert med
natriumklorid




Mesalt® stimulerer rensing av svært væskende og infiserte sår.


Hvordan bruke Mesalt®

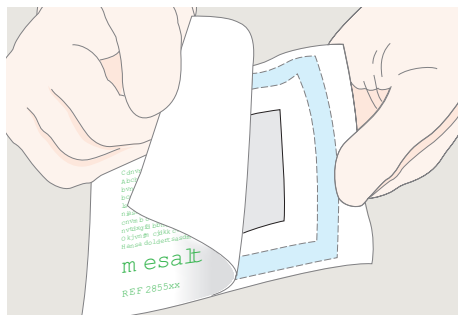

1. Rens såret og åpne pakken.

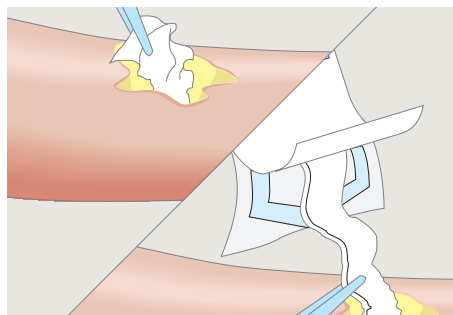

2. Appliser eller legg en tørr Mesalt® mot såret. Ikke fukt før applisering.

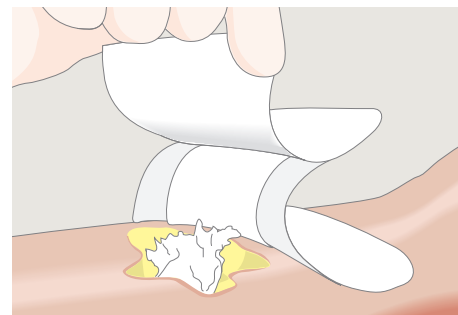

3. Appliser Mepilex® Border Flex som en sekundærbandasje. Avhengig av mengde sårveske skiftes Mesalt normalt daglig eller oftere hvis nødvendig.

Slik fungerer Mesalt

Sårsekretet frigjør natriumklorid fra bandasjen. Mesalt stimulerer effektivt rensing av sår i inflammasjonsfasen ved å absorbere sårsekret, bakterier og nekrotisk materiale fra såret. Dette fremmer den naturlige sårhelingsprosessen.

Bruksområder

Mesalt skal brukes i behandlingen av svært væskende sår og infiserte, væskende sår i inflammasjonsfasen, som for eksempel:

- Trykksår
- Kirurgiske sår

Fordeler med Mesalt

- Stimulerer debridering
- Reduserer bakteriemengden
- Enkel å bruke

Forholdsregler

Mesalt skal ikke benyttes på tørre sår.

Bruk av Mesalt er dokumentert via studier. Denne dataen er tilgjengelig fra Mölnlycke Health Care ved forespørsel.



Mesalt sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
Mesalt			
285580	5 x 5	30	240
285780	7,5 x 7,5	30	240
286080	10 x 10	30	240
Mesalt® Rull			
285280	2 x 100	10	80

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mesalt and Mepilex trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. © 2019 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC1051908