



Mesorb®

Absorberende bandasje med sperresjikt

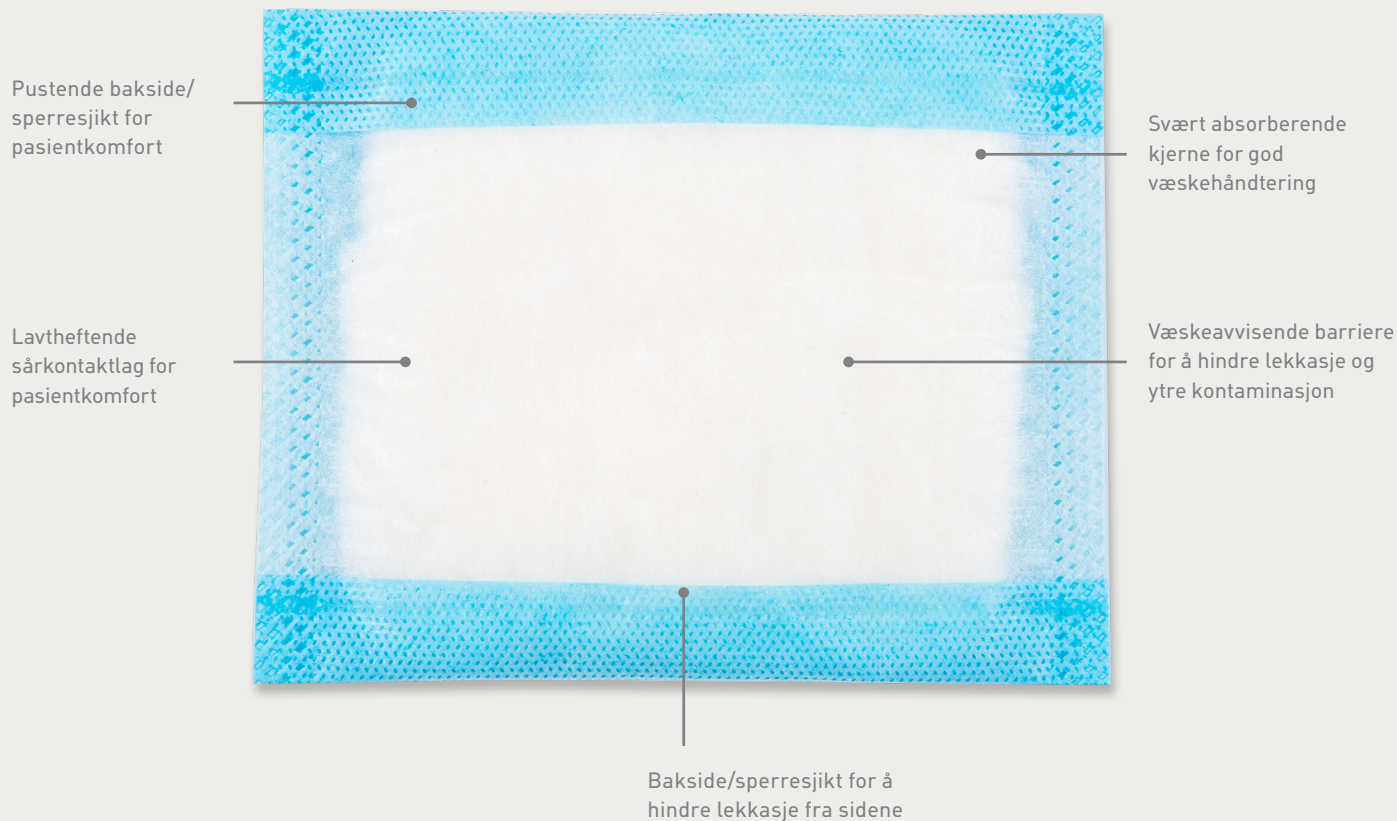


Mesorb® er en myk høyabsorberende bandasje som holder på store mengder sårveske. Den væskeavvisende barrieren forhindrer ytre kontaminasjon av såret, og hindrer at klær og sengetøy tilsøles.


Hvordan bruke Mesorb®

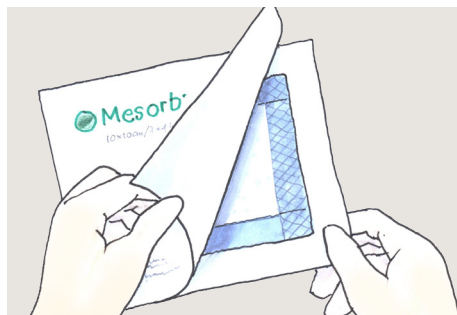

1. Åpne pakningen og ta ut bandasjen.

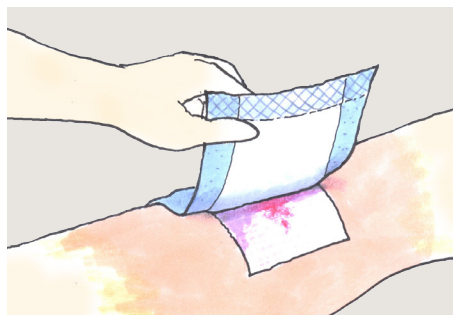

2. Appliser Mesorb® på såret eller på valgt primærbandasje med minst 1 cm overlapping til omkringliggende hud.

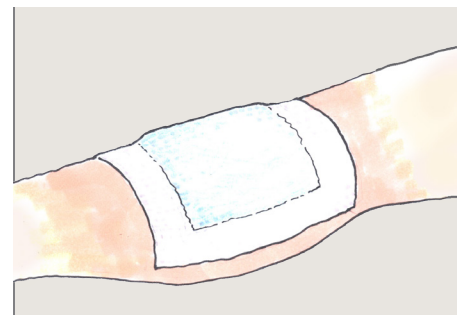

3. Fest bandasjen med en passende fiksering (for eksempel Mefix®, Mepore® Film, eller Tubifast®)

Slik fungerer Mesorb

Sårvæsken absorberes og transporteres inn i Mesorb av sårkontaktlaget og spredningslaget. Den svært absorberende kjernen absorberer væske og er samtidig en sårpute med god beskyttelse og ventilasjon.

Den væskeavvisende barrieren hindrer ytre kontaminasjon av såret, og beskytter klær og sengetøy mot lekkasje. Baksiden/sperresjiktet forhindrer lekkasje fra sidene.


Bruksområder

Mesorb egner seg til bruk på moderat til svært væskende sår.

Mesorb kan brukes som primærbandasje (direkte på såret) eller som sekundærbandasje, hvor høy absorpsjon er påkrevd (for eksempel sammen med Mepitel® One eller Mepilex® Transfer).

Skiftefrekvens

Mesorb kan ligge på i mange dager, avhengig av sårets tilstand eller som forskrevet av helsepersonell.

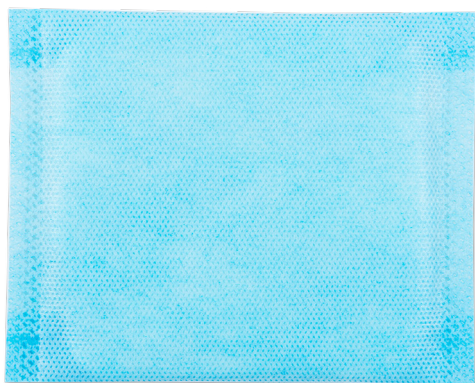

Fordeler med Mesorb

- Absorberer store mengder væske
- Beskyttende sårpute
- Pustende
- Kostnadseffektiv
- Den unike væskeavvisende barrieren reduserer skiftefrekvensen og forhindrer at klær og sengetøy tilsøles

Forholdsregler

Mesorb bør ikke benyttes på infiserte sår uten at kyndig helsepersonell er kontaktet.

Mesorb sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. Nr.	Størrelse i cm	Sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
677001	10 x 13	10 x 10	50	400
677080	10 x 10		10	100
677201	13 x 15	10 x 15	50	300
677280	10 x 15		10	90
677401	10 x 23	10 x 20	50	300
677480	10 x 20		10	100
677601	15 x 23	15 x 20	50	300
677680	15 x 20		10	100
677701	23 x 25	20 x 25	30	120
677780	20 x 25		10	60
677801	23 x 30	20 x 30	30	120
677880	20 x 30		10	50

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mesorb, Mepitel, Mepilex, Mefix, Mepore Film, and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0841902


Mölnlycke®