

Mestopore®

Absorberende bandasje for kontinent stomi

Lavheftende
absorpsjonspute uten
fiberloing for god
væskeshåndtering og økt
sikkerhet


Pustende
nonwoven-film, væsketett
for komfort og beskyttelse

Ikke-heftende
polyamidnetting for bedre
komfort


Vannbasert heftemiddel av
polyakrylat for skånsom og
sikker fiksering

Mestopore® er en selvheftende, absorberende bandasje for kontinent stomi.


Hvordan bruke Mestopore®

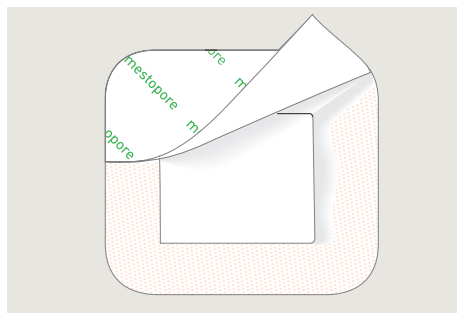

1. Fjern beskyttelsespapiret fra den øverste halvdelen av Mestopore.

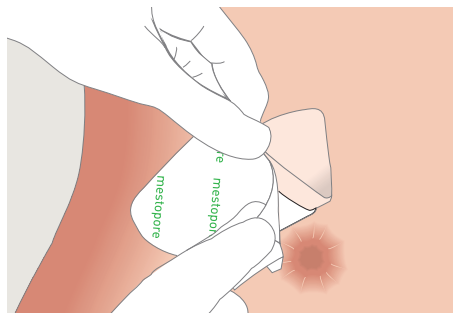

2. Appliser bandasjen skånsomt mot huden over stomien.

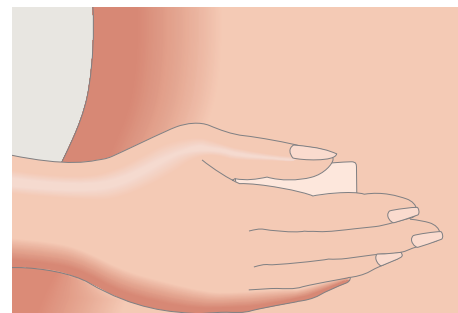

3. Ved fjerning, løft opp og dra bandasjen forsiktig av.

Slik fungerer Mestopore

Mestopore er en selvheftende, absorberende bandasje til kontinent stomi. Et ikke-heftende kontaktlag beskytter stomi-vevet mot skade. Sekret fra stomien absorberes og oppbevares i en kjerne av svært absorberende og svellende fibre. Den selvheftende kanten er ikke-irriterende, selv ved hyppige bandasjeskift, og forhindrer at bandasjen lekker. Det mikroporøse baksidematerialet lar huden puste.

Bruksområde

Mestopore er spesielt utviklet for bruk på pasienter med kontinent stomi

Fordeler ved Mestopore

- Hudvennlig
- Skånsomt heftemateriale
- Former seg etter kroppen
- Dusjtett
- Etterlater ingen limrester
- Enkel å bruke

NB!

Ved kliniske tegn til infeksjon må helsepersonell kontaktes for behandling.



Mestopore leveres usteril

Art. nr.	Størrelse i cm	Sårpute i cm	Antall i eske	Antall i kartong
665000	9 x 10	5 x 5,5	20	160

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo, Tlf: 22 70 63 70. The Mölnlycke and Mestopore trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC0741812