


Mextra® Superabsorbent


Allsidig løsning i håndteringen av svært væskende sår

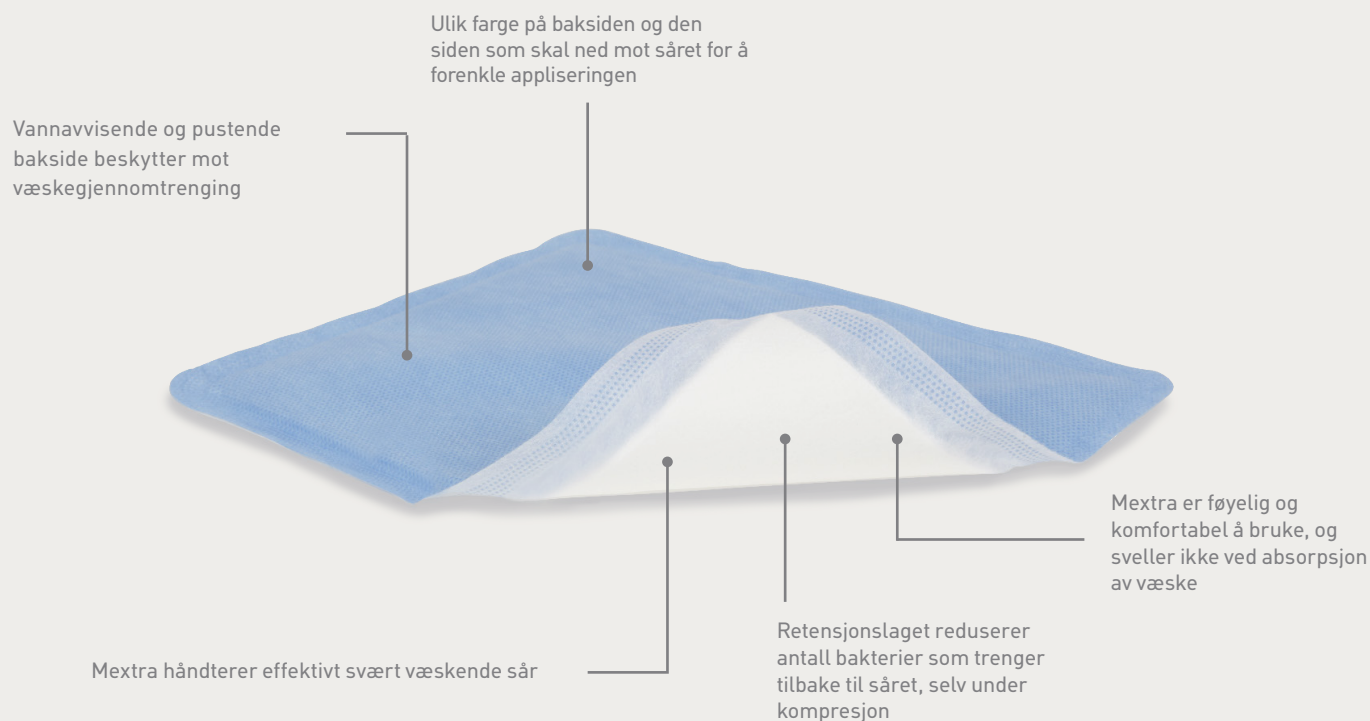


Egenskaper:

- Raskt væskeopptak
- Høy absorpsjons- og retensjonskapasitet, noe som minimerer risikoen for maseasjon
- Reduserer antall bakterier som trenger tilbake til såret, selv under kompresjon
- Føyelig og komfortabel


Hvordan bruke Mextra® Superabsorbent

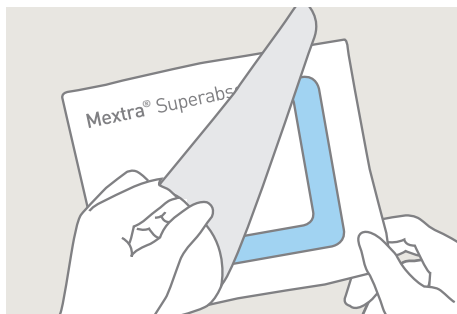

1. Rens sårområdet. Velg en bandasjestørrelse som passer til såret.

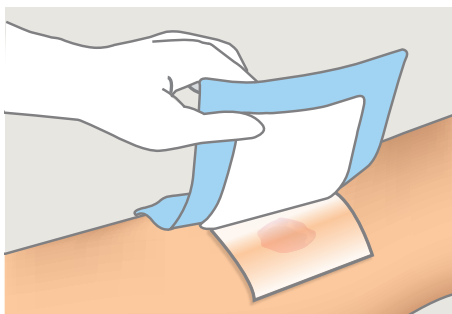

2. Appliser Mextra Superabsorbent direkte på sårområdet med den hvite siden ned mot såret. For best resultat bør bandasjen overlape tørr hud med minst 2 cm. Mextra Superabsorbent kan også brukes sammen med primærbandasjer, som Mepitel®. Kan brukes på kroniske sår, som trykksår og leggsår.

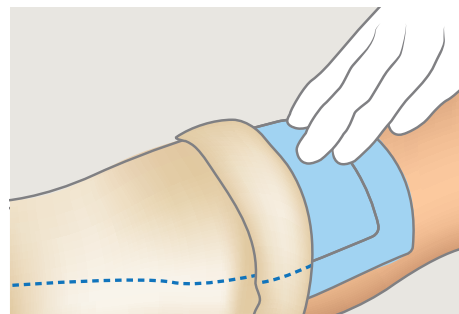

3. Sikre bandasjen med en egnet fiksering, for eksempel Tubifast® eller Mepitac tape. Mextra Superabsorbent kan også brukes under kompresjon

Fordeler med Mextra Superabsorbent

- Reduserer risikoen for maserasjon (beskytter omkringliggende hud)
- Kan brukes på venøse leggsår under kompresjonsbandasjer
- Absorberer og holder på bakterieholdig sårveske
- Komfortabel å bruke
- Enkel å applisere



Mextra Superabsorbent sortiment (sterile enhetspakninger)

Art. nr.	Størrelse i cm	Antall i eske	Antall i kartong
610700	10 x 10	10	50
610710	10 x 15	10	40
610720	10 x 20	10	90
610730	15 x 20	10	40
610740	20 x 25	10	40
610750	20 x 30	10	50
610760	20 x 40	10	50

Bruksområder

Mextra® Superabsorbent egner seg for moderat til svært væskende sår. Sårvesken blir absorbert opp gjennom sårkontaktlaget og holdes inne i bandasjen slik at risikoen for maserasjon reduseres. Den vannavisende og pustende baksiden hindrer væskegjennomtrenging og dermed lekkasje og tilsøling av klær og sengetøy.

Skiftefrekvens

Såret og Mextra Superabsorbent bør kontrolleres regelmessig. Bandasjen bør skiftes avhengig av sårets tilstand eller før den er gjennombløt av væske. Mextra Superabsorbent kan maksimalt ligge på såret i syv dager.

Referanse: Mölnlycke Health Care. Data on file. 2020.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Telefon: 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mextra, Mepitel and Tubifast trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC3032203


Mölnlycke®