

Mepilex® Border

PANSEMENT HYDROMOUSSE ABSORBANT

- Minimise les traumatismes et la douleur
- Gestion optimale de l'exsudat
- Auto-adhésif: ne nécessite pas de fixation
- Permettant la douche

Film externe en polyuréthane

- Perméable à l'air et la vapeur
- Imperméable
- Résistant aux bactéries et aux virus (>25nM)

Couche Safetac®

- Atraumatique lors du retrait
- N'adhère pas à la plaie
- Réduit le risque de macération

Coussin à 3 couches


- Capacité supérieure d'absorption
- Risque réduit de fuite et de macération



Technologie Safetac®

Safetac® est une technologie unique et brevetée qui minimise la douleur et le traumatisme pour le patient. La technologie Safetac® est disponible exclusivement sur les pansements de Mölnlycke Health Care, notamment les pansements Mepilex Border Post-Op, les pansements Mepilex, Mepitel, Mepiform et Mepitac.

Pour plus d'information, visitez www.safetac.com

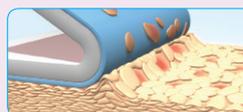

Les adhésifs traditionnels n'adhèrent que sur les crêtes de la peau, et doivent donc être plus fortement adhésifs pour rester en place.




Safetac épouse les reliefs de la peau, scellant ainsi la plaie. En plus, le pansement n'adhère pas au lit de la plaie.

Mode d'emploi Mepilex® Border




1. Nettoyez la plaie.
Otez d'abord le film protecteur supérieur.

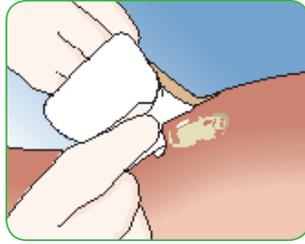

2. Positionnez d'abord le côté adhésif et maintenez la 2e partie soulevée.
Appliquez la face adhésive sur la plaie.

Mode d'emploi Mepilex® Border Sacrum

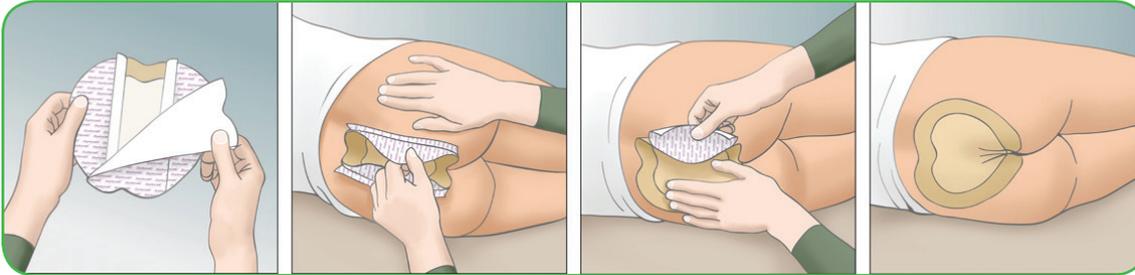

1. Nettoyez la plaie. Otez d'abord le film protecteur au milieu.

2. Appliquez la face adhésive sur la plaie. Ne pas étirer.

3. Retirez le film protecteur d'un côté. Appliquez la face adhésive et répétez avec l'autre côté. Ne pas étirer.

4. Lissez le pansement et les bords.

Avantages


- Minimise les traumatismes et la douleur lors du retrait
- Minimise le risque de macération
- Gestion optimale d'exsudat
- Auto-adhésif : application des plus aisées
- Fixation forte pour peaux sensibles
- Confort de port
- Peut être maintenu plusieurs jours sur la plaie dépendant de la condition de la plaie
- Permettant la douche

Indications

- Plaies exsudatives à fortement exsudatives
- Escarres
- Plaies aiguës p.e. écorchures, brûlures (2ième degré)
- Plaies postopératoires

Mesures de précaution

En cas de signes cliniques d'infection, instaurer un traitement.

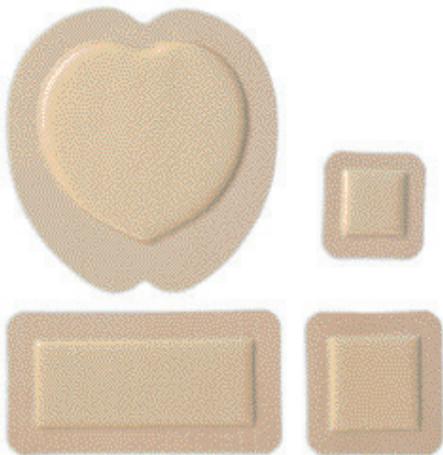

Mepilex Border assortiment

Réf.	Dim. (cm)	Code CNK	Pcs/RET	Pcs/TRP
295200	7,5x7,5	2339-703	5	14x5
295300	10x10	2339-729	5	10x5
295800	10x20	2594-406	5	7x5
295850	10x25	2777-274	5	7x5
295900	10x30	2594-422	5	5x5
295400	15x15	2339-745	5	10x5
295600	15x20	2339-760	5	9x5

Mepilex Border Sacrum assortiment

Réf.	Dim. (cm)	Code CNK	Pcs/RET	Pcs/TRP
282500	15x15	2853-562	5	10x5
282000	18x18	2442-945	5	8x5
282400	23x23	2442-960	5	5x5

Plus d'info sur www.molnlycke.com/be-fr

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72/2, 2600 Berchem, Belgique. Tél +32 (0)3 286 89 50 - Fax +32 (0)3 286 89 52

Mölnlycke Health Care, Mepilex sont des marques et des logos déposés par la société Mölnlycke Health Care AB.
© 2010 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés.


Mölnlycke®